

# Quick Start .... Aenderung Patientenspezifischer Felder

1. Öffnen sie QPC und klicken sie das Options Menü an und gehen auf Define Column Labels.
2. Passen sie den Ausgangsaufkleber an ihre Bedürfnisse an. ACHTEN sie bitte darauf, dass einige Felder für Text und andere für Daten sind.
3. Klicken sie auf OK zur Bestätigung ihrer Eingaben. Das Patienten / Untersuchungs-Fenster wird eingerichtet und ihre Informationen werden übernommen.
4. Sie können die alten Labels wieder herstellen durch Anklicken der Restore Defaults Schaltfläche.

