

# Quick Start .... Anlegen/Aendern von Patientenakten

1. Öffnen sie die QPC Xscan32 Software und klicken auf New in dem Patient Information Dialog unter Patient. Alternativ, wenn der Patient schon auf der Patientenliste ist, wählen sie den Patienten aus und klicken auf Edit im Patient Information Dialog.

2. Tragen sie die Patienteninformationen in die entsprechenden Felder ein.

**HINWEIS:** Nachname, Vorname, Datum und Geburtsdatum müssen eingetragen werden. Sie können auch Patient ID zu einem erforderlichen Feld machen, indem sie im Options Menü auf Preferences und dann Defaults Tab klicken.

3. Klicken sie auf Save oder Save & View wenn sie die Patienteneingabe abgeschlossen haben.

**HINWEIS:** Save & View wird die Patientendaten anlegen/editieren und die Untersuchung zum Betrachten oder Scannen der Bilder augenblicklich beginnen.

4. Zur Anlegung einer neuen Untersuchungsakte für den Patienten gehen sie zum Patient Information Dialog und klicken auf New unter Exam.

5. Klicken sie auf Save oder Save & View wenn sie die Eingabe der Information abgeschlossen haben.

**HINWEIS:** Wenn sie einen Patientenakte ohne Bilder öffnen, wird QPC Xscan32 automatisch das eingestellte Scan-Interface öffnen. Diese Einstellung können sie ändern durch klicken auf das Options Menü, dann Preferences und dann auf Scanner Tab.

The screenshot shows the 'Patient Information' dialog box with the 'Add New Record' tab selected. The 'Information' section includes fields for Xscan ID (0), Patient ID, Last Name, First Name, Date (9/ 8/2004), Doctor, and DOB. The 'Exam' section includes Exam Date/Time (9/ 8/2004, 5:55:10 PM), Inst. Name, and DICOM Acc No. There are also text areas for Study Comments and Visit Comments. At the bottom, there are buttons for 'Cancel', 'Save', and 'Save & View'. To the left of the dialog is a vertical menu with buttons for 'New', 'Edit', 'Delete', 'Mark', 'Search', 'Worklist Query', 'View', 'Hide', 'Close', 'Info->Rpt', 'New', 'Edit', 'Delete', 'Mark', and 'Add To Queue'.

The screenshot shows the 'Information' dialog box. The 'Exam Date/Time' field is set to 9/ 8/2004, 6:11:57 PM. There are also fields for Inst. Name, Study Desc., and DICOM Acc No. There are also text areas for Study Comments and Visit Comments. At the bottom, there are buttons for 'Cancel', 'Save', and 'Save & View'.