


Quick Start Archivierung der QPC Datenbank

1. Öffnen sie QPC und klicken sie auf Archive Database im File Menü.

2. Sie werden aufgefordert, den Archivierungsprozess zu bestätigen.


3. Wählen sie den Zielort für den Datenbestand.

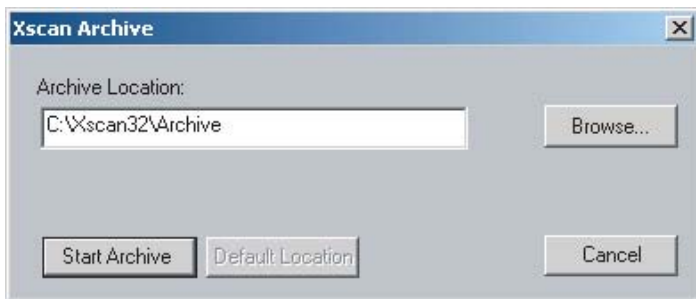


4. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist wird das Programm sie über den Speicherort informieren. **HINWEIS:** Aktuelles Datum und Uhrzeit wird für den Ordernamen des archivierten Datenbestands eingesetzt.

Wiederherstellung archivierten Datenbestands

5. Zur Wiederherstellung eines Archivs klicken sie auf Restore Archive im File Menü. **HINWEIS:** der derzeitige Datenbestand in QPC muss leer sein.

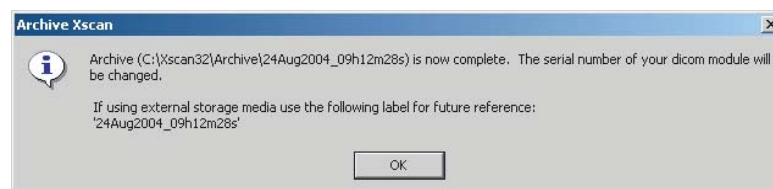

6. Wählen sie den Ort des Datenbestands, der wiederhergestellt werden soll.

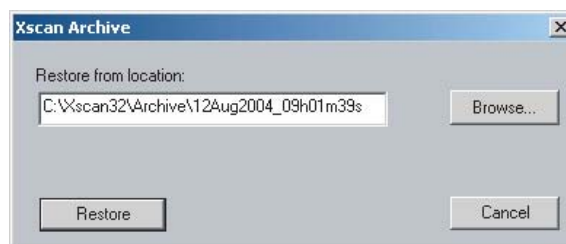

iCRco
The Intelligent CR Company

20406 Earl Street, Torrance, CA 90503 phone: (310) 921-9559 fax: (310) 921-2559