

# Quick Start .... CR Bearbeitung

1. Öffnen sie ein Bild zur Ansicht.
2. Wählen sie einen anatomischen Bereich aus dem CR Preset Kasten.
3. Klicken sie auf Process zur Bearbeitung.
4. Wenn sie auf Reset drücken, wird der alte Zustand des Bildes wieder hergestellt.  
**HINWEIS:** wenn sie Process wieder drücken werden die ursprünglichen Daten wieder hergestellt und nochmals bearbeitet.
5. Zur Verbesserung der Bearbeitungsstärke ändern sie Gain und Frequency Enhancement nach ihren Bedürfnissen. **HINWEIS:** sie können die CR Voreinstellungen anpassen durch Update, damit die Verarbeitungsstärke jedes Mal eingestellt wird bei dem gegenwärtigen anatomischen Bereich.

