


Quick Start CR Kollimation Maskierung

1. Öffnen sie ein Bild zum Anschauen.

2. Klicken sie auf die Mask  Schaltfläche zur Entfernung der Kollimationsfläche aus dem Bild. **HINWEIS:** Stellen sie sicher, dass sie eine Anatomieansicht ausgewählt haben.



3. Zur Entfernung der Kollimationsmaske klicken sie erneut die Mask Schaltfläche an.

iCRco
The Intelligent CR Company

20406 Earl Street, Torrance, CA 90503 phone: (310) 921-9559 fax: (310) 921-2559