





Quick Start Links Rechts CR Markierungen

1. Öffnen sie ein Bild zum anschauen.
2. Wählen sie Left/Right Markers  um eine links oder rechts Markierung einzufügen.
3. Wählen sie entweder Left oder Right Marker. Wenn sie auf den Left/Right Marker Knopf klicken, wird die Left  Marker Ikone erscheinen. Klicken sie nochmals auf den Left/Right Marker Knopf, wird die Right  Marker Ikone erscheinen.
4. Klicken sie auf das Bild, wo sie die Ikone platzieren wollen.
5. Zum Entfernen des Markers klicken sie nochmals auf die Right/Left Marker  Schaltfläche.

