

Quick Start QPC XSCAN 32 Installation

1. Legen sie die QPC XSCAN32 Software CD-ROM in ihren PC. Sie wird automatisch starten.
2. Wenn die Schnell-Demo beendet ist, wählen sie QPC XSCAN32 aus dem Software Menü.
3. Die QPC XSCAN32 Installation startet automatisch.
4. Drücken sie Next im Begrüßungs-Dialog.
5. Lesen sie das Software License Agreement sorgfältig durch und drücken Yes wenn sie den Bedingungen zustimmen.
6. Wählen sie die Komponenten, die sie installieren möchten und drücken sie Next.
7. Bestimmen sie ihre Hardware aus der Liste und drücken sie Next.
8. Wählen sie den Zielordner und drücken dann Next.
9. Drücken sie Next im Program Folder Dialog.
10. QPC XSCAN32 wird installiert. **HINWEIS:** wenn sie QPC XSCAN32 schon auf ihrem Computer installiert haben und dieser eingeschaltet ist, während sie die neue Version installieren wollen erscheint eine Fehlermeldung.
11. Klicken sie auf Finish wenn QPC XSCAN32 installiert ist.
12. Klicken sie auf Exit im Software Menü.

